

ТАБЛИЦА ТЕСТОВ НА ВЫЯВЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ

ВИДЫ НАРКОТИКОВ



метамфетамин
(MET)



амфетамин
(AMP)



бензодиазепин
(BZO)



опиаты/морфий/
героин (MOP)




марихуана
(THC)




кокаин
(COC)

ПО МОЧЕ


Мультитест Narcoscreen тест-кассета

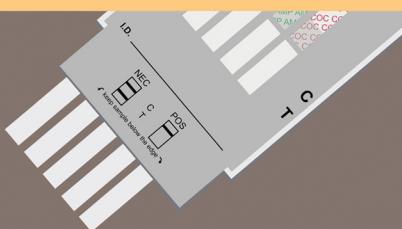


Тест полоски 10 шт.

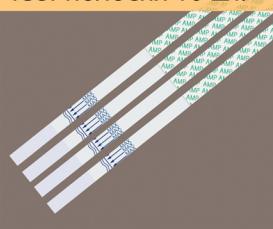

Тест полоски 10 шт.

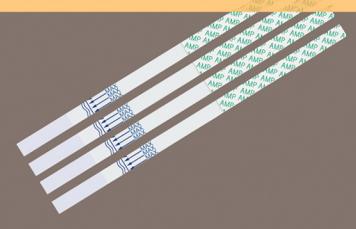

Тест полоски 10 шт.

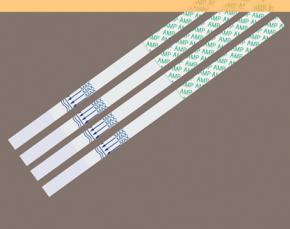

ПО СЛЮНЕ

Мультитест Narcoscreen тест-кассета



Тест касеты на нарко тики Narcoscreen 5 шт.



Тест касеты на нарко тики Narcoscreen 5 шт.



Тест на нарко тики Narcoscreen 5 кассет



Как пользоваться тестом

Способ применения:

Соберите мочу в чистую сухую посуду и поместите тест в мочу до уровня, обозначенного стрелками, на 10 секунд. Достаньте тест из мочи и положите его на ровную сухую поверхность. Оцените результат в течение 10 мин., но не позднее 15 мин.



ПО МОЧЕ



Способ применения:

1. Достаньте мультипанель из герметичной упаковки
2. Используя слюносборник, накапlyте по 3-4 капли образца слюны на белую адсорбирующую поверхность каждой из 5 полосок;
3. Прочтайте результат тестирования в промежутке от 3 до 8 минут с начала тестирования. Не интерпретируйте результат тестирования спустя 8 минут от начала тестирования.



ПО СЛЮНЕ

Как проявляются индикаторы

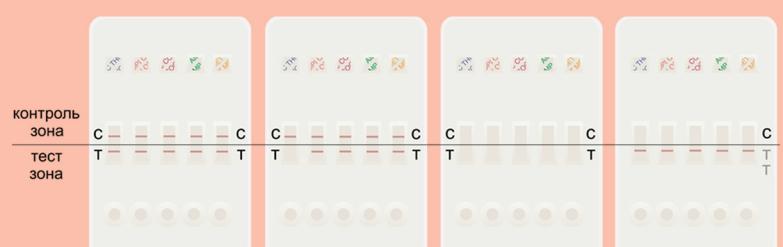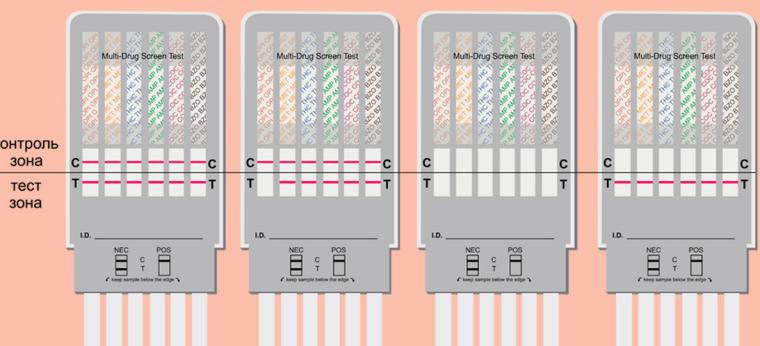

**Отрицательный
результат**
наркотик не выявлен

**Положительный
результат**
выявлен морфий

Ошибка тестирования
анализ необходимо повторить

Отрицательный: Появление двух темных линий. Это значит наркотик не выявлен. Обратите внимание на то, что вторая цветная полоса очень слабой интенсивности и указывает, что уровень наркотика (или его метаболитов) в выборке мочи близок к пороговому уровню чувствительности. Этот результат следует интерпретировать как отрицательный.

Положительный: Появление только одной темной линии. Это значит, что наркотик выявлен.